



Bedienungsanleitung DEDigitale Waage / Modell SF-889 Artikel-Nr. 38129052150

Vielen Dank, dass Sie sich für die digitale Waage SF-889 aus unserem Produktsortiment entschieden haben.

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb, die Aufrechterhaltung der Lebensdauer und die Genauigkeit dieser Waage gewährleisten zu können, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig.



I. Wichtige Produkteigenschaften

- Hochpräzises Sensorsystem
- Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Verschiedene Maßeinheiten (kg, lb, b/oz).
- Externe Kalibrierung
- Tara-Funktion
- Kapazität: 150 kg
- Anzeige bei niedrigem Batteriestand und Überladung
- Fernanzeige (an der Wand, auf dem Schreibtisch ...)
- Ermöglicht das Wiegen großer Pakete, ohne die Anzeige zu verdecken
- Plattform aus rostfreiem Stahl
- Stromversorgung: 1.5 V x 4 AA-Batterie oder 110V Adapter (im Lieferumfang enthalten).
- Schaltet sich nicht automatisch ab
- Integrierte Uhr (drücken Sie die ON/TIME-Taste, um sich die Uhrzeit anzeigen zu lassen)
- Mindestgewicht: 300 g

Besuchen Sie unsere Website

www.animalcare.horizont.com

2. Betrieb

- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie die Waage auf einer ebenmäßigen Oberfläche.
- Legen Sie die mitgelieferte 1,5-V-Batterie in das entsprechende Fach ein oder schließen Sie den Netzadapter an.
- Betätigen Sie die Taste "ON/TIME", um die Waage einzuschalten.
- Warten Sie, bis auf dem Display "0.0" (Null) angezeigt wird, bevor Sie einen Gegenstand auf die Waage legen.
- Legen Sie den gewünschten Gegenstand vorsichtig auf die Wiegeplattform.
- Es dauert einige Sekunden, bis sich das Gewicht stabilisiert hat und es auf der LCD-Anzeige sichtbar wird.
- Um zwischen den verschiedenen Maßeinheiten (lb, kg, lb/oz) wählen zu können, betätigen Sie die Taste "UNIT".

3. Tara-Funktion

Die Tara-Taste setzt die Anzeige auf 0 zurück, wenn sich das Gewicht auf der Waage befindet. Wird die Tara-Taste gedrückt, so subtrahiert die Waage das gewogene Gewicht. Stellen Sie den Behälter, den Sie verwenden möchten, auf die Waage. Wenn sich die Anzeige stabilisiert hat, betätigen Sie einmal auf die Tara-Taste. Die Anzeige wird auf Null zurückgesetzt, so dass Sie dem Behälter Gegenstände hinzufügen können und das entsprechende Nettogewicht angezeigt bekommen.

4. Technische Daten

- Modell: FS-7704
- Kapazität: 100 kg / 120 kg / 150 kg / 200 kg
- Auflösung: 0.1lb / 0.05 kg / 20 zor 0.21b / 0.1kg / 4oz
- Gewichtseinheiten: Pfund (lb), Kilogramm (kg), Pfund und Unze (lb / oz).
- Weißer LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
- Abmessungen: 392 x 305 x 29 mm
- Stromyersorgung: 4AA oder Netzteil (beides im Lieferumfang enthalten)
- Mindestgewicht: 0.3 kg

5. Kalibrierung

- Stellen Sie die Waage im Uhrmodus auf eine ebenmäßige Oberfläche.
- Drücken Sie die Taste "TARE" und während Sie diese gedrückt halten, betätigen Sie zusätzlich die Taste "ON/TIME" für etwa drei Sekunden.
- Nach drei Sekunden erscheint eine Zufallszahl.
- Drücken Sie erneut auf "TARE" auf dem Bildschirm erscheint nun die Anzeige "50 kg".
- Vergewissern Sie sich, dass die Waage stabil steht und legen Sie dann das Gewicht von 50 kg auf die Plattform der Waage.
- Auf dem Bildschirm erscheint nun die Anzeige "PASS".
- Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

6. Wartung und Pflege

- Lagern Sie die Waage an einem vor Feuchtigkeit geschütztem Ort
- Lassen Sie die Waage nicht fallen
- Vermeiden Sie eine Überlastung der Waage
- Lassen Sie keine Gewichte auf der Waage liegen, wenn sie nicht in Gebrauch ist
- Wechseln Sie die Batterie aus, wenn auf dem Display der Waage der Hinweis "Lo" erscheint

7. Befestigung der Waage an der Wand

- 1. Verbinden Sie die Waage mithilfe des Stromkabels mit der elektronischen Anzeige
- 2. Befestigen Sie die Wählscheibe mit den beiliegenden Befestigungsschrauben
- 3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, um die Batterie zu versorgen